


# ポンベの残量の見方



針が14辺りを指していたら、満タンです。

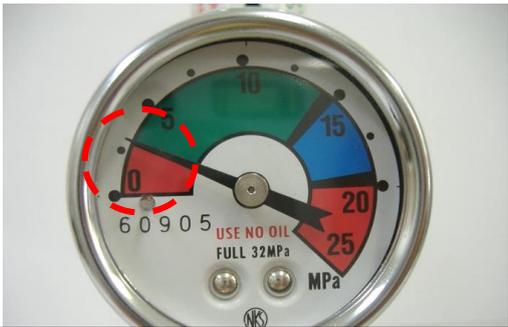

針が赤い範囲に入ったらポンベを交換。

# ③流量目盛を処方流量に合わせる。



# ④吸入を始める。



# 吸入の開始

## ①ポンベの元栓をゆっくり開く。



## ②黒いダイヤルを手前に回し、



# 吸入の停止

## ①ポンベの元栓をしっかりと閉める。



## ②流量目盛を『0.0』にする。



# ポンベの交換方法

①ポンベの元栓をしっかりと閉める。




②ダイヤルを回し、調整器内の酸素を抜く。



③取付ハンドルをゆるめる。




④調整器を外し新しいポンベに付替える。

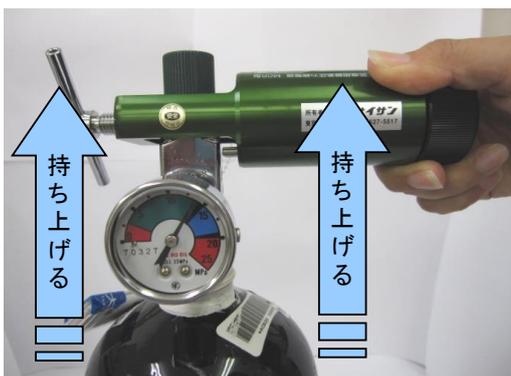

新しいポンベのテープを外してから取付ける。

⑤ピンが穴に入るように取り付ける。

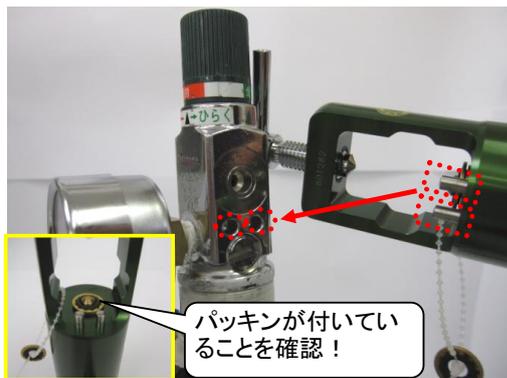

⑥取付ハンドルをしっかりと締め付ける。



1ℓで使用すると  
ポンベ1本で、  
約 時間  
酸素を吸うことができます。

## 注意事項



**【酸素火災実験】**

- ・酸素吸入中にタバコを吸うとこのようになります。
- ・酸素吸入中は、絶対に火気を取扱わない。

株式会社サイサン  
医療ガス部  
TEL 048-722-9001

